

KÄYTTÖOHJE

Remo-Wax® korvavahaa liuottavat korvatipat

Käyttötarkoitus

Remo-Wax korvatipat liuottaa korvan vahatulppia.

Älä käytä Remo-Waxia, jos

- korva on tulehtunut tai kipeä
- korvasta vuotaa eritettä
- tärykalvo on vaurioitunut, puhjennut tai puhkaistu (esim. tärykalvoputki)
- olet allerginen (yliherkkä) jollekin Remo-Waxin sisältämälle aineelle.

Erityisryhmät

Jos sinulla on koordinaatiovaikeuksia, liikehäiriöitä tai käsien vapinaa, pyydä jotakin toista henkilöä tiputtamaan Remo-Wax -tipat korvakäytävääsi ja huuhtelemaan korvasi alla olevien ohjeiden mukaan.

Lapset

Remo-Waxia saa käyttää lapsille vain lääkärin harkinnan mukaan. Noudata tarkasti saamiasi ohjeita. On suositeltavaa, että lapsen korvat huuhdellaan lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla.

Kuulokojeen käyttäjät

Jos sinulla on kuulokoje, laita se paikoilleen vasta sen jälkeen, kun korva on huuhdeltu ja vesi valunut pois korvasta.

Mahdolliset haittavaikutukset

Remo-Waxin käytön yhteydessä on joissakin harvinaisissa tapauksissa ilmennyt paikallisia allergisia reaktioita. Myös epä mukava tunne korvakäytävässä, ihoärsytys ja ohimenevä huimaus ovat mahdollisia. Tinnitus voi olla korvavahatulpan oire ja korvan puhdistuksen jälkeen voi esiintyä ohimenevää tinnitusta.

Jos korvapumppu työnnetään syvälle korvakäytävään, se voi vaurioittaa tärykalvoa.

Ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin, jos epäilet Remo-Waxin aiheuttaneen sinulle jonkin haittavaikutuksen.

Korvatippojen ja korvapumpun käyttö

Vahatulpan liuottaminen korvatipoilla

- Lämmitä Remo-Wax-pullon sisältö kädenlämpöiseksi (noin 37 °C) sulkemalla pullo muutamaksi minuutiksi kämmenen sisään.
- Kallista päätä kohti olkapäätä tai asetu makuulle päätä sivulle käännettynä ja tiputa korvaan noin 10–20 tippaa Remo-Waxia. Vedä korvanipukkaa kevyesti ylös ja alas pyörittävällä liikkeellä muutaman kerran. Korvaan voi laittaa pienen vanutupon, joka on kostutettu muutamalla Remo-Wax-tipalla.
- Anna Remo-Waxin vaikuttaa 20–60 minuuttia. Voit tarvittaessa antaa liuoksen vaikuttaa myös yön yli.

Remo-Wax korvatippojen käytön jälkeen korvakäytävä on huuhdeltava. Voit käydä huuhteluttamassa korvat lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla tai käyttää huuhtelussa Remo-Wax korvapumppua. Etenkin jos kyseessä on lapsi, on suositeltavaa käydä huuhteluttamassa korvat vastaanotolla.

Korvan huuhteleminen korvapumpulla

- Korvapumppu tulee huuhdella joka kerta ennen käyttöä.
- Vedä korvapumppuun kädenlämpöistä vettä.
- Vie pumpunärkeä parin millimetrin verran varovaisesti korvakäytävään ja huuhtelee korva puristamalla korvapumppua kevyesti ja rauhallisesti.

Älä työnnä pumpunärkeä syvälle korvakäytävään!

- Toista huuhtelu muutaman kerran, kunnes korvasta poistuva vesi on täysin kirkasta.
- Huuhtelee korvapumppu ja purista se tyhjäksi jokaisen hoitokerran jälkeen. Jätä valumaan kärki alaspäin.

Jos vahatulppa ei liukene, voit tarvittaessa toistaa tippojen annon ja korvien huuhtelun kolmena peräkkäisenä päivänä.

Huom! Huuhtelee korvakäytävä jokaisen hoitokerran jälkeen.

Jos olet menossa korvahuuhteluun lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle, noudata heiltä saamiasi ohjeita.

Korvan huuhtelemisen ei pitäisi koskaan aiheuttaa kipua. Jos tunnet kipua, lopeta korvan huuhtelemisen ja ota yhteys lääkäriin.



Vältä tuotteen joutumista silmiin. Tarvittaessa huuhtelee silmät runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä Remo-Waxin käytöstä, ota yhteys lääkäriin, terveydenhoitajaan tai apteekkiin.

Koostumus

Allantoiini (3 mg/ml), etoksyloitu lanoliini, polysorbaatti 80, polysorbaatti 60, nestemäinen sorbitoli, fruktoosiisirappi, polyoksieteenistearyylietteri, polyoksieteenioleoylietteri, lanoliiniöljy, isopropyylimyristaatti, riisileseöljy, fenetanoli, setyylialkoholi, butyylihydroksitolueeni, sorbiinihappo, benseetoniumkloridi ja vesi. Korvapumppu: polyvinyylikloridi (PVC)

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Säilytä Remo-Wax-tipat ja korvapumppu poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Älä käytä pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Tuotetta ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Vie tarpeeton tuote apteekkiin hävitettäväksi. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkaukset

Remo-Wax korvatipat 10 ml

Remo-Wax korvatipat 5 x 10 ml

Remo-Wax korvatipat 10 ml, sisältää korvapumpun

Valmistaja

Remo-Wax:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomi

Korvapumppu:

Albert Hohlikörper GmbH & Co. KG

Maerkische Strasse 35

58675 Hemer

Saksa

Käyttöohje tarkistettu

12.6.2023



Lääkinnällinen laite



Lue pakkausseloste ennen käyttöä



Lue varoitukset pakkausselosteesta



Valmistaja



Säilytyslämpötilan yläraja



Viimeinen käyttöpäivämäärä



Eränumero

CE 0537

CE

BRUKSANVISNING

Remo-Wax® öronvaxlösande örondroppar

Indikationer

Remo-Wax löser upp vaxproppar i örat.

Använd inte Remo-Wax

- vid öroninflammation eller ont i örat
- vid flytningar från örat
- vid trumhinneskada, sprucken eller punkterad trumhinna (t. ex. rör inopererat i trumhinnan)
- om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnen i Remo-Wax.

Särskilda användargrupper

Om du har koordinationssvårigheter, rörelsesvårigheter eller darrande händer be någon annan droppa Remo-Wax i din hörselgång och skölja ditt öra enligt de här anvisningarna.

Barn

Remo-Wax används för barn endast enligt läkares bedömning. Följ noggrant anvisningarna du får. Öronsköljning hos barn ska helst göras på läkares eller hälsovårdarens mottagning.

Användare av hörapparat

Om du använder hörapparat, sätt den på plats först efter öronsköljningen och när vattnet har runnit ut ur örat.

Möjliga biverkningar

I sällsynta fall har lokala allergiska reaktioner förekommit vid användning av Remo-Wax. Obehaglig känsla i hörselgången, hudirritation och övergående svindel kan även förekomma. Tinnitus kan vara ett symptom av vaxpropp och övergående tinnitus kan förekomma efter rengöring av örat.

Om sköljblåsan trycks djupt in i hörselgången kan trumhinnan skadas.

Kontakta läkare eller apotek om du misstänker att Remo-Wax har gett dig biverkningar.

Användning av öronspray och sköljblåsan

Så här använder du öronspray för att lösa upp vaxproppar

- Värm Remo-Wax flaskan i handen i några minuter så att innehållet får kroppstemperatur (cirka 37 °C).
- Luta huvudet åt sidan eller lägg dig med huvudet på sidan och droppa omkring 10–20 droppar Remo-Wax i örat. Dra örsnibben upp och ner försiktigt med en vridande rörelse ett par gånger. Örat kan täppas till med en liten bomullstuss fuktad med några droppar Remo-Wax.
- Låt Remo-Wax verka i 20–60 minuter. Vid behov kan lösningen lämnas att verka över natten.

Efter användning av Remo-Wax örondroppar måste hörselgången sköljas. Du kan gå till läkaren eller hälsovårdaren för öronsköljning eller använda Remo-Wax sköljblåsa. Öronsköljning på mottagning är särskilt rekommenderat när det är fråga om ett barn.

Så här sköljer du ur örat med sköljblåsan

- Sköljblåsan bör sköljas varje gång före användning.
- Dra upp handvarmt vatten i sköljblåsan.
- För försiktigt in sköljblåsans spets några millimeter i hörselgången och skölj örat med ett lätt och lugnt tryck på sköljblåsan.

Blåsans spets ska inte tryckas djupt in i hörselgången!

- Upprepa sköljningen ett par gånger, tills sköljvattnet är helt rent.
- Skölj sköljblåsan och kläm den tom efter varje behandling. Lämna den att tömmas med spetsen nedåt.

Om vaxproppen inte löses, kan behandlingen med örondroppar och öronsköljning upprepas vid behov tre dagar i följd.

Obs! Skölj ur hörselgången med sköljblåsan efter varje behandling.

Om öronsköljningen görs på läkares eller hälsovårdarens mottagning, följ deras anvisningar.

Det får aldrig göra ont vid sköljningen. I sådana fall, sluta öronsköljning och kontakta en läkare.



Undvik kontakt med ögonen. Vid behov skölj ögonen med rikligt vatten och kontakta läkare.

Om du har frågor angående användningen av Remo-Wax bör du kontakta läkaren, hälsovårdaren eller apoteket.

Innehåll

Allantoin (3 mg/ml), etoxylerat lanolin, polysorbit 80, polysorbit 60, flytande sorbitol, fruktosirap, polyoxyetenstearyleter, polyoxyetenoleyleter, lanolinolja, isopropylmyristat, riskliolja, fenetylalkohol, cetylalkohol, butylhydroxitoluen, sorbinsyra, bensenonklorid och vatten.
Sköljblåsan: polyvinylklorid (PVC)

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara Remo-Wax droppar och sköljblåsan utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte efter utgångsdatumet på förpackningen.

Produkten ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Överbliven produkt lämnas in på apotek för kassering. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningar

Remo-Wax örondroppar 10 ml

Remo-Wax örondroppar 5 x 10 ml

Remo-Wax örondroppar 10 ml med sköljblåsa

Tillverkare

Remo-Wax:
Orion Corporation
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

CE 0537

Sköljblåsa:

Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG
Maerkische Strasse 35
58675 Hemer
Tyskland

CE

Bruksanvisning reviderad

12.6.2023



Medicinteknisk produkt



Läs bipacksedeln före användning



Bekanta dig med varningarna i bipacksedeln



Tillverkare



Den maximala förvaringstemperaturen



Sista användningsdatum



Satsnummer