

KOSTEUTTAVAT SILMÄTIPAT  
Sisältää 0,4 % hyaluronihappoa  
10 ml  
Säilöntäaineeton ja fosfaattiton

Koostumus: Hyaluronihappo 0,4 %, natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Mitä Bevita Eye -silmätipat ovat?

Bevita Eye on säilöntäaineeton ja fosfaattiton silmätippaliuos, joka sisältää 0,4 % hyaluronihappoa.

Bevita Eye -pakkaus


Bevita Eye säilöntäaineettomat silmätipat on pakattu 10 ml tippapulloon.

Mihin Bevita Eye -silmätippoja käytetään?


Bevita Eye silmätippaliuos sisältää suurimolekulaarista hyaluronihappoa, jota valmistetaan bioteknologisen synteessin avulla. Hyaluronihappo on kehon voitelevissa nesteissä esiintyvä aine. Viskositeettinsa ansiosta sillä on optimaalisesti silmää voitelevat ominaisuudet, silmää kosteuttava ja kyynelfilmiä stabiloiva vaikutus. Hyaluronihapon voitelevat, kosteuttavat ja suojaavat ominaisuudet lievittävät ympäristötekijöistä (tuuli, aurinko, kuiva ilma, savu), silmiin kohdistuvista stressitekijöistä (liian kirkas valo, pitkäjaksoinen tietokoneen käyttö) tai mekaanisista syistä (piilolinssien käyttö, silmäleikkaukset) johtuvaa kuivuutta, polttavaa tunnetta tai roskan tuntua. Oireita helpottava vaikutus on pitkäkestoinen. BevitaEye silmätipat ovat säilöntäaineettomia ja ne soveltuvat käytettäväksi piilolinssien kanssa.

Kuinka silmätippoja käytetään ja kuinka paljon?

1 tippa silmään tarpeen mukaan useitakin kertoja päivässä.

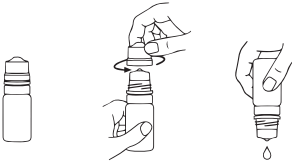

Varoitukset ja varotoimet

- Älä käytä silmätippaliuosta, jos pakkaus tai pullo näyttää vaurioituneelta.
- Valmiste on tarkoitettu vain ulkoiseen ja paikalliseen käyttöön silmissä.
- Älä käytä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin sen sisältämälle aineelle.
- Valmistetta ei saa käyttää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Varo koskettamasta silmän pintaa tippakärjellä.
- Harvoissa tapauksissa näkö voi sumentua hetkeksi silmätippojen laiton jälkeen. Tämä johtuu silmätippaliuoksen viskositeetista. Odota siis muutama sekunti ennen kuin ryhdyt tarkkaa näkökykyä vaativiin toimiin.
- Pidä vähintään 10 - 15 minuutin väli BevitaEye silmätippojen laiton jälkeen ennen kuin tiputat jotain muuta silmätippavalmistetta silmiin.
- Avatun pullon sisältö on käytettävä 90 päivän kuluessa sen ensimmäisestä avaamisesta. Etiketissä symboli .
- Sulje pullo huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen varmistaen ettei tippakärkeen jää nestettä.
- Ravista neste tarvittaessa pois.
- Säilytettävä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.
- Säilytettävä +2 - +25 °C:ssa.
- Bevita Eye silmätippoja ei saa niellä.
- Älä tiputa pullosta kerralla enempää kuin 30 tippaa, ettei pullo painu kasaan.

Pakkauksen symbolit:

 Lääkinnällinen laite



Lue käyttöohjeet




Hävitä asianmukaisesti käytön jälkeen



Lämpötilan raja-arvot

Valmistaja:

Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italia

 Steriloitu aseptisesti

Markkinoija:

Orion Pharma, PL 65, 02101 Espoo. Puh: 010-4261

 Eränumero

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: Toukokuu 2019.  
[www.itsehoitoapteekki.fi](http://www.itsehoitoapteekki.fi)



Viimeinen käyttöpäivämäärä



Valmistaja



 0546

A-0089838-01-4

FUKTANDE ÖGONDROPPAR

Innehåller 0,4 % hyaluronsyra  
10 ml

Utan konserveringsmedel och fosfater

Innehållsämnen: Hyaluronsyra 0,4 %, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

Vad är Bevita Eye ögondroppar?

Bevita Eye är ögondroppar i form av en lösning med 0,4 % hyaluronsyra. Dropparna innehåller inga konserveringsmedel.

Bevita Eye förpackningens beskrivning?


Bevita Eye ögondroppar utan konserveringsmedel och fosfater finns att få i förpackningar med 10 ml.

Vad används Bevita Eye ögondroppar för?


Bevita Eye är en lösning som innehåller stormolekylär hyaluronsyra som tillverkas på bioteknologisk väg. Hyaluron syra är ett ämne som förekommer i kroppens egna smörjmedel och som tack vare sin höga viskositet fungerar som ett optimalt smörjmedel också för ögonen. Detta ämne förmår såväl fukta ögonen som stabilisera tårfilmen. De smörjande, fuktgivande och skyddande egenskaperna hos hyaluronsyra lindrar känslan av torra ögon, av brännande sveda eller skräp i ögat, vilka orsakas av bl.a. olika faktorer i vår omgivning (vind, sol, torr luft, rök), av stressfaktorer (alltför klart ljus, långvarigt bruk av datorer) eller av rent mekaniska skäl (bruk av kontaktlinser, ögonoperationer). Den lindring hyaluronsyra ger är dessutom långvarig. BevitaEye ögondropparna innehåller inga konserveringsmedel och de kan också användas tillsammans med kontaktlinser.

Hur ska ögondropparna användas och hur många droppar ska man applicera?

1 droppe i ögat, vid behov även flera gånger per dag.

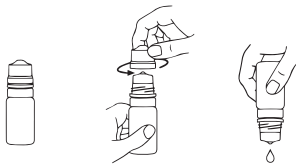

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Använd inte detta preparat om förpackningen eller flaskan ser ut att vara skadade på något vis.
- Detta preparat är endast avsett för utvärtes och lokalt bruk i ögonen.
- Använd inte preparatet om du är överkänslig mot något av innehållsämnen.
- Dessa ögondroppar får inte användas efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Undvik att vidröra ögats yta med droppspets!
- Kortvarig dimsyn som beror på dropplösningens viskositet kan förekomma i sällsynta fall. Vänta därför i några sekunders tid innan du tar itu med någon uppgift som kräver skarp syn.
- Om du också använder andra ögonpreparat ska du hålla en paus på minst 10-15 minuter mellan appliceringen av BevitaEye och eventuella andra preparat.
- Innehållet i en öppnad flaskan ska användas senast inom 90 dagar efter öppnandet. Symbolen finns på etiketten .
- Stäng flaskan ordentligt efter varje användning, se till att ingen vätska blir kvar i spetsen. Skaka bort vätskan vid behov.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid +2 - +25 °C.
- Bevita Eye ögondroppar får ej sväljas.
- Leverera inte mer än 30 droppar i rad att flaskan inte kollapsar.

Förpackningens symboler:



Läs instruktionerna



Medicinteknisk produkt



Kassera på säkert sätt efter användning



Gränsvärden för förvaringstemperaturerna

Tillverkare:

Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italien



Steriliserad med aseptisk teknik

Marknadsförs av:

Orion Pharma, PB 65, 02101 Esbo, Tfn: 010-4261



Batchnummer

Denna bipacksedel ändrades senast: Maj 2019.

[www.itsehoitoapteekki.fi](http://www.itsehoitoapteekki.fi)



Sista användningsdatum



0546



Tillverkare