

Koostumus: Karbomeeri 0,2 %, setrimidi, sorbitoli, natriumhydroksidi, dinatriumedetaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Mitä Bevita Eye silmägeeli on? Bevita Eye silmägeeli on hypotoninen liuos, joka sisältää karbomeeri 980 0,2 %:ia. Geelillä on ns. muko-adhesiivisia ominaisuuksia. Geeli voitelee silmää muodostamalla suojaavan kalvon sarveis- ja sidekalvon pinnalle, mikä saa silmän pinnan tuntumaan miellyttävämmältä ja kosteammalta.

Valmistemuoto: Bevita Eye silmägeeli on pakattu 10 g:n putkiloihin.

Milloin Bevita Eye silmägeeliä käytetään?

Bevita Eye on tarkoitettu lievittämään kuivasilmäisyyden oireita kuten epämukavaa tai roskan tunnetta silmissä tai silmien lieviä ärsytysoireita. Bevita Eye antaa pitkäaikaisen helpotuksen.

Kuinka Bevita Eye silmägeeliä käytetään?

1 geelitippa silmään/silmiin 3 - 4 kertaa vuorokaudessa tai tarpeen mukaan.

Poista putkilon korkki, taivuta päätä taaksepäin ja vedä alaluomea hieman alaspäin siten, että luomen ja silmän väliin muodostuu tasku. Purista putkiloa kunnes pieni tippa muodostuu putkilon kärkeen, josta se tipahtaa silmään ja levittäytyy tasaiseksi kerrokseksi luomen sisäpinnalle. Räpyttele silmäsi 2 - 3 kertaa, että geelitippa leviää tasaisesti silmän pinnalle. Pyyhi mahdollinen geeliylimäärä silmänympärysalueelta. Sulje putkilon korkki huolellisesti.

Varoitukset ja varoimet

- Älä käytä tätä silmägeeliä, jos putkilo on vaurioitunut tai uuden putkilon korkin sulkeva sinetti näyttää vahingoittuneelta.
- Älä käytä geeliä, jos olet allerginen jollekin sen sisältämistä ainesosista.
- Valmistetta ei saa käyttää putkiloon merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Vältä koskemasta silmän pintaa putkilon kärjellä.
- Sulje putkilon korkki huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Poista piilolinssit silmistä ennen geelin käyttöä. Piilolinssit saa laittaa takaisin silmiin aikaisintaan 30 minuutin kuluttua geelitippojen laitosta.
- Harvoissa tapauksissa näkö voi sumentua hetkeksi geelitippojen laiton jälkeen. Tämä johtuu geelin viskositeetista. Odota siis muutama sekunti ennen kuin ryhdyt tarkkaa näkökykyä vaativiin toimiin.
- Pidä vähintään 15 minuutin väli toisen silmävalmisteen laittamiseen.
- Avattu putkilo ja mahdollisesti jäljellä oleva geeli on hävitettävä, kun ensimmäisestä avaamisesta on kulunut 28 vrk.
- Säilytettävä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.
- Säilytettävä +2+ 25 °C:ssa.
- Vain ulkoiseen ja paikalliseen käyttöön silmissä.

Pakkauksen symbolit:



Lue käyttöohjeet



Lämpötilan raja-arvot



Steriloitu aseptisesti



Eränumero



Viimeinen käyttöpäivämäärä



Valmistaja



Lääkinnällinen laite

Valmistaja:

Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italia

Markkinoija:

Orion Pharma, PL 65, 02101 Espoo. Puh: 010-4261

Tämä ohje on tarkistettu viimeksi: Elokuu 2019.

www.itsehoitoapteekki.fi



Hävitä asianmukaisesti käytön jälkeen



A-0089828-01-2

Innehållsämnena: Karbomer 0,2 %, cetrimid, sorbitol, natriumhydroxid, dinatriumedetat, vatten för injektionsvätskor.

Vad är Bevita Eye? Bevita Eye är en hypoton lösning som innehåller 0,2 % karbomer 980 och som innehåller s.k. mukoadhesiva egenskaper. Bevita Eye smörjer ögat genom att bilda en skyddande hinna på horn- och bindhinnans yta. Denna hinna gör att ögats yta känns behagligare och fuktigare.

Beskrivning av preparatet: Bevita Eye tillhandahålls i tuber med 10 g ögongel.

För vilka besvär lämpar sig Bevita Eye?

Bevita Eye är avsett att lindra de symtom torra ögon orsakar, som t.ex. allmänna obehagskänslor eller känslor av skrap i ögat samt lindrig ögonirritation. Bevita Eye ger en långvarig lindring.

Hur ska Bevita Eye användas?

1 droppe gel i ögat/ögonen 3-4 gånger dagligen, eller vid behov.

Skruva av hatten på tuben, luta huvudet bakåt och dra ned det nedre ögonlocket en aning så att en ficka bildas mellan ögats yta och ögonlocket. Kläm på tuben tills en liten droppe gel faller ned och breder ut sig över det nedre ögonlockets insida. Blinka 2-3 gånger så att geldroppen breder ut sig möjligast jämnt över hela ögats yta. Torka av eventuell överlopps gel som brett ut sig i området runt ögat. Upprepa vid behov för det andra ögat. Tillslut tuben väl efter användandet.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Använd inte denna ögongel om tuben är skadad eller sigillet på hatten till en ny tub ser ut att vara brutet
- Använd inte preparatet om du är överkänslig mot något av innehållsämnena.
- Får inte användas efter det utgångsdatum som anges på tuben.
- Undvik att vidröra ögats yta med tubspetsen.
- Tillslut tuben noggrant varje gång då du använt preparatet.
- Ta ut kontaktlinser ur ögonen innan du applicerar Bevita Eye.
- Linserna kan sättas tillbaka i ögonen igen tidigast då 30 minuter förflutit efter droppandet.
- Kortvarig dimsyn kan förekomma i sällsynta fall. Detta beror på gelens viskösa egenskaper.
- Vänta därför i några sekunders tid innan du tar itu med någon uppgift som kräver skarp syn.
- Vänta på minst 15 minuter mellan appliceringen av något annat preparat.
- Öppnad tub och eventuellt kvarvarande innehåll ska kasseras då 28 dagar förflutit efter att tuben öppnades för första gången.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid +2 - +25 °C.
- Endast för utvärtes och lokalt bruk i ögonen.

Förpackningens symboler:



Läs instruktionerna



Gränsvärden för förvaringstemperaturerna



Steriliserad med aseptisk teknik



Batchnummer



Sista användningsdatum



Tillverkare



Medicinteknisk produkt

Tillverkare:

Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italien

Marknadsförs av:

Orion Pharma, PB 65, 02101 Esbo, Tfn: 010-4261

Bipacksedeln reviderades senast: Augusti 2019.

www.itsehointoapteekki.fi



Kassera på säkert sätt efter användning.



0546