

**Keskivaikean ja vaikean kuivasilmäisyyden hoitoon:** kosteuttaa, suojaa, voitelee, tasapainottaa. Hoitaa ja ennaltaehkäisee kuivien silmien oireita. Käytä pullo kuuden (6) kuukauden kuluessa avaamisesta ja viimeiseen käyttöpäivään mennessä.


**Koostumus:** Dekspantenoli (B5-provitamiini) 0,5 %, Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) -siemenöljy 0,5 %, trehaloosi ja glyseroli steriilissä, hypotonisessa trometamol/sitraatti -emulsiossa.

Ei sisällä säilöntäaineita, alkoholia, fosfaatteja, boraatteja, mineraaliöljyä tai eläinperäisiä ainesosia.

**Mikä Bevita Eye Silmäsuihke on ja mihin sitä käytetään?** Bevita Eye Silmäsuihke on Suomessa kehitetty ja valmistettu CE-merkitty lääkinnällinen laite, joka sopii käytettäväksi myös piilolinssien kanssa. Tuote on kuivien silmien oireiden ja vaurioiden hoitamiseen ja ennaltaehkäisemiseen sekä silmäluomien ja silmänympärysihon kosteuttamiseen tarkoitettu lipidi-mikroemulsio -silmäsuihke. Tuote annostellaan suljetulle silmäluomelle. Kuivien silmien kyynelkalvoon syntyy pistemäisiä kuivia ja hyvin korkean osmolaarisuuden kohtia, jotka aiheuttavat silmänpinnan vaurioita ja tulehdusta. Silmien epämukavat kutinan, polttelun ja karheuden tuntemukset sekä näön sumeneminen johtuvat näistä vaurioista ja kyynelkalvon kunnollisen suojan puuttumisesta. Bevita Eye Silmäsuihkeen mikroemulsion sisältämä Sacha Inchi -siemenöljy levittyy silmän pinnalle vahvistaa kyynelkalvon luonnollisen lipidikerroksen suojaa ja estää kyynel-nesteen haihtumista. Trehaloosi, dekspantenoli ja glyseroli sitovat vettä sekä vakauttavat ja voitelevat kyynelkalvoa. Lievästi hypotonisessa (matalaosmolaarisessa) liuoksessa ne auttavat pitämään osmolaarisuuden turvallisella tasolla. Dekspantenoli (B5-provitamiini) ja glyseroli sekä Sacha Inchi -siemenöljyn luonnolliset antioksidanttiyhdisteet ja omega-rasvahapot suojaavat silmän pintaa ja silmänympärysihoa kuivumisen aiheuttamalta soluvaurioilta ja nopeuttavat niiden paranemista. Silmät tuntuvat miellyttäviltä, kun silmän pinta on toipunut. Tulehduksen vaimennuttua silmän sidekalvon punoitus vähenee. Näkeminen helpottuu myös silmiä rasittavissa olosuhteissa. Erikoisrakenteensa ansiosta pulloa voi käyttää missä asennossa tahansa.

### Käyttöohjeet:

1. Irrota suojakorkki.
2. Testaa annostelijan toimintaa ennen suihkeen ensimmäistä annostelua suihkauttamalla muutama kerta esim. käsivarteen tai ilmaan.
3. Suuttimessa on pykälä: paina suutin pohjaan asti suihkeen annostelemiseksi. Vie pullo 15-20 cm:n päähän silmistä.

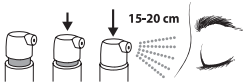

4. Kohdistaa suutin suljetulle silmälle ja annostelee painamalla pumpppu alas. Annostelee 1-2 suihkausta silmäluomille.
5. Laita suojakorkki takaisin suuttimen päälle.

Voit käyttää suihketta oireiden mukaan useita kertoja päivässä sekä piilolinssien käytön aikana. Jos käytät muita silmänympärystuotteita tai silmämeikkiä, anna niiden kuivahata vähintään 10 minuuttia ennen suihkeen käyttöä tai odota vähintään 10 minuuttia suihkeen annostelun jälkeen. Jos käytät silmämeikkiä, annostelee suihke hiukan kauempaa meikin leviämisen estämiseksi (meikkituotteen ominaisuuden mukaan).

### Varoitukset ja varotoimet:

- Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä jollekin sen aineosalle.
- Älä käytä tuotetta, jos pullo on vioittunut.
- Älä kosketa pullon suuttimella silmää tai ihoa. Älä kosketa suuttimen kärkeä sormilla.
- Suihke voi aiheuttaa tilapäistä epämukavuuden tunnetta, jos sitä annostellaan avoimeen silmään.
- Älä käytä tuotetta pullossa ja kotelossa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen tai yli kuusi kuukautta avaamisesta.
- Odota vähintään 10 minuuttia suihkeen ja muun silmänhoitotuotteen annostelun välillä.
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Säilytä 5-25 °C:een lämpötilassa. Suojaa pullo suoralta auringonvalolta. Älä käytä tuotetta, joka on jäänyt tai jota on säilytetty pitkään kuumassa.
- Hävitä tyhjä pullo asianmukaisesti. Tarkoituksellisen ylitäytön vuoksi pulloon jää pieni määrä nestettä.
- Tuotteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja turvavalle viranomaiselle (Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea. Puh: 029 522 3341).

### Valmistaja:

Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto, Suomi. Puh: 02 489 110

### Markkinoija:

Orion Pharma, PL 65, 02101 Espoo. Puh: 010-4261

Ohje on tarkistettu viimeksi: elokuu 2021 [www.itsehoitoapteekki.fi](http://www.itsehoitoapteekki.fi)



Lue varoitukset  
pakkaukseloosteesta



Suojaa  
auringonvalolta



Eränumero



Valmistuspäivä



Lue  
käyttöohjeet



Käytä kuuden  
kuukauden kuluessa  
avaamisesta



Steriloitu  
aseptisesti



Viimeinen  
käyttöpäivämäärä



Lämpötilan  
raja-arvot



Ei lasten ulottuville  
eikä näkyville



Lääkinnällinen  
laite



Valmistaja

2527-2  
A-0103301-01-2

**För behandling av måttligt eller mycket torra ögon:** tillförlitligt, ger skydd, smörjer och balanserar. Lindrar och förebygger symptom orsakade av torra ögon. Sprayflaskan ska användas inom sex (6) månader efter att den tagits i bruk, och alltid före det utgångsdatum som anges på förpackningen.


**Innehållsämnen:** Dexpantenol (provitamin B5) 0,5 %, Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) -fröolja 0,5 %, trehalos och glycerol i en steril, hypoton emulsion med trometamol/citrat.

Innehåller varken konserveringsmedel, alkohol, fosfater, borater, mineraloljor eller animaliska ingredienser.

**Vad är Bevita Eye Ögonspray och vad används det för?** Bevita Eye Ögonsprayen är en CE-märkt medicinteknisk produkt som utvecklats och tillverkats i Finland. Ögonsprayen är en lipid-mikroemulsion som är avsedd för behandling och förebyggande av symptom och skador orsakade av torra ögon, samt för fuktande av ögonlock och huden runt ögonen. Sprayen ska doseras på slutna ögonlock. Då ögonen är torra uppkommer små, torra punkter med mycket hög osmolaritet i tårfilmen, vilket orsakar skador och inflammation på ögats yta. Den obehagliga klåda, brännande känsla, känsla av strävhets och dimsyn som torra ögon orsakar, beror på just dessa skador och på bristen på det skydd som en intakt tårfilm erbjuder. Sacha Inchi-fröolja i mikroemulsionen i Bevita Eye Ögonsprayen breder ut sig över ögats yta och förstärker det naturliga skydd som tårfilmens lipidskikt ger. Samtidigt förebygger oljan också avdunstningen av tårvätskan. Sprayens trehalos, dexpantenol och glycerol binder vatten och stabiliserar samt smörjer tårfilmen. I den lätt hypotona (med låg osmolaritet) lösningen hjälper dessa ämnen till att upprätthålla osmolariteten på en trygg nivå. De naturliga antioxidanterna och omega-3-fettsyrorna i dexpantenol (provitamin B5) och glycerol samt Sacha Inchi-fröolja skyddar ögats yta och huden runt ögat mot cellskador orsakade av torka, och gör dessutom läkningen av sådana skador snabbare. Sprayen ger en behaglig känsla i ögonen då ögats yta återhämtar sig. När inflammationsreaktionen väl lagt sig, minskar även rodnaden i bindhinnan. Det blir lättare att se också under omständigheter som annars anstränger ögonen. Lämpar sig även för bruk tillsammans med kontaktlinser. Flaskans specialdesign gör det möjligt att använda sprayflaskan i vilket läge som helst.

### Bruksanvisning:

1. Ta av skyddslocket.
2. Testa spraypumpens funktion genom att pumpa några gånger t.ex. på din arm eller ut i luften.
3. Munstycket har en sektion: tryck munstycket ända ner för att dosera sprayen. Håll flaskan på ca 15-20 cm avstånd från ögat.

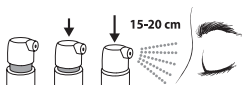

4. Rikta munstycket mot det slutna ögat och dosera genom att pressa ner pumpen. Dosera 1-2 pumpningar på bägge ögonlocken.
5. Lägg tillbaka skyddslocket.

Sprayen kan användas flera gånger dagligen enligt behov och symptom. Kan även användas tillsammans med kontaktlinser. Om du använder andra produkter som appliceras runt ögonen eller t.ex. ögonmakeup, ska du låta dessa torka i minst 10 minuter innan du doserar sprayen - eller tvärtom, vänta i minst 10 minuter efter att du använt sprayen tills du applicerar de andra produkterna. Spraya ögonsprayen från ett litet längre avstånd än vanligt om du använder ögonmakeup. Detta för att förhindra att makeupens kladdar (beroende på makeupens egenskaper). Innehållet i sprayflaskan ska användas inom sex (6) månader efter att flaskan tagits i bruk, och alltid före det utgångsdatum som anges på förpackningen.

### Varningar och försiktighetsåtgärder:

- Använd inte ögonsprayen om du är överkänslig mot något av innehållsämnen.
- Använd inte produkten om flaskan är skadad.
- Vidrör inte ögat eller huden med spraymunstycket. Rör inte heller vid spraymunstycket med fingrarna.
- Sprayen kan orsaka övergående obehagskänslor i ögat om den doseras i öppet öga.
- Produkten får inte användas efter det utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen, och inte heller i mer än sex månaders tid efter att flaskan tagits i bruk.
- Håll en paus på minst 10 minuter mellan doseringen av denna spray och andra eventuella ögonvårdsprodukter.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid 5-25 °C. Skydda sprayflaskan mot direkt solljus. Använd inte spray som frusit eller som förvarats länge i höga temperaturer.
- Släng den tomma flaskan på adekvat sätt. Flaskan är överfylld med avsikt, vilket innebär att en liten mängd vätska kommer att bli kvar i flaskan.
- Allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren och tillsynsmyndigheten (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea tfn: 029 522 3341).

### Tillverkare:

Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto, Suomi. Puh: 02 489 110

**Marknadsförs av:** Orion Pharma, PB 65, 02101 Esbo. Tfn: 010-4261

Texten uppdaterades senast i augusti 2021 [www.itsehitoapteekki.fi](http://www.itsehitoapteekki.fi)



Läs varningarna i bipacksedeln



Skydd mot solljus



Satsnummer



Tillverkningsdatum



Läs bruksanvisningen



Använd vid 6 månader efter öppnandet



Steriliserad med aseptisk teknik



Sista användningdatum



Gränsvärden för förvaringstemperaturerna



Förvaras utom syn- och räckhåll för barn



Medicinteknisk produkt



Tillverkare

