

Koostumus: A-vitamiinipalmitaatti 250 IU/g, nestemäinen parafiini, valkovaseliini.

Mitä Bevita Eye A silmävoide on? Bevita Eye A on A-vitamiinia sisältävä, säilöntäaineeton silmävoide.

Valmistemuoto: Bevita Eye A silmävoide on pakattu 5 g:n putkiloihin.

Milloin Bevita Eye A silmävoidetta käytetään?

Bevita Eye A on tarkoitettu lievittämään pitkäkestoisesti kuivasilmäisyyden oireita, joita ovat silmien ärsytys, polttava tunne ja punoitus. Oireita aiheuttavat ympäristötekijät (tuuli, aurinko, kuiva sisäilma, suolavesi, savu, kirkas valo) tai pitkäkestoinen silmien rasittaminen (opiskelu, lukeminen, tietokoneet, pimeällä ajo) tai piilolinssien käyttö. Silmävoiteen sisältämän A-vitamiinin voitelevat ja kosteuttavat ominaisuudet auttavat palauttamaan kyynelkalvon normaalin fysiologisen tilan ja suojelevat silmän pintaa.

Kuinka Bevita Eye A silmävoidetta käytetään?

Pese kädet ja poista voideputkilon korkki. Taivuta päätä taaksepäin ja vedä alaluomea alaspäin etusormella niin, että luomen ja silmän pinnan väliin muodostuu pieni tasku. Purista hitaasti voideputkiloa, kunnes olet annostellut noin 1 cm:n voidetta alemman silmäluomen sisäpuolelle. Räpyttele silmiä 2 - 3 kertaa niin, että voide leviää tasaisesti koko silmän pinnalle. Pyyhi mahdollinen voideylimäärä silmänympärysalueelta pehmeällä, puhtaalla paperipyyhkeellä. Sulje voideputkilon korkki. Koostumuksensa vuoksi silmävoide voi aiheuttaa lievää ja ohimenevää näön hämärtymistä annostelun jälkeen. Tästä johtuen on suositeltavaa, että silmävoidetta annostellaan kerran vuorokaudessa iltaisin ennen nukkumaanmenoa.

Varoitukset ja varoimet

- Vain ulkoiseen ja paikalliseen käyttöön silmissä.
- Älä käytä silmävoidetta, jos olet allerginen jollekin sen sisältämistä ainesosista.
- Silmävoiteen rasvainen koostumus voi aiheuttaa lievää ja tilapäistä näön hämärtymistä heti annostelun jälkeen. Voiteen käyttöä juuri ennen tarkkaa näkökykyä vaativia toimia (esim. autolla ajoa, koneiden käyttöä) ei suositella.
- Poista piilolinssit silmistä ennen voiteen käyttöä. Piilolinssi saa laittaa takaisin silmiin aikaisintaan 30 minuutin kuluttua silmävoiteen annostelusta.
- Jos käytät lisäksi jotain toista silmävalmistetta, pidä vähintään 30 minuutin tauko Bevita Eye A -silmävoiteen ja tämän toisen valmisteen annostelujen välissä, ja annostele aina Bevita Eye A viimeiseksi.
- Avattu putkilo ja mahdollisesti jäljellä oleva silmävoide on hävitettävä, kun putkilon ensimmäisestä avaamisesta on kulunut 90 vrk.
- Vältä koskemasta silmän pintaa tai silmäripsiä putkilon kärjellä.
- Silmävoidetta ei saa käyttää pakkauksen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Säilytettävä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.
- Älä käytä silmävoidetta, jos putkilo on vaurioitunut.
- Säilytettävä +15 - +25 °C:ssa.

Pakkauksen symbolit:

-  Lue käyttöohjeet
-  Lämpötilan raja-arvot
-  Steriloitu aseptisesti
-  Eränumero
-  Viimeinen käyttöpäivämäärä
-  Valmistaja
-  Lääkinnällinen laite

Valmistaja:

Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italia

Markkinoija:

Orion Pharma, PL 65, 02101 Espoo, Puh: 010-4261

Ohje on tarkistettu viimeksi: Elokuu 2019.
www.itsehoitoapteekki.fi



Hävitä asianmukaisesti käytön jälkeen



0546

A-0095626-01-2

BevitaEye A

SMÖRJANDE ÖGONSALVA 5 G TUB

Innehåller vitamin A / Utan konserveringsmedel
Ger långvarig lindring och skydd för torra ögon.

Innehållsämnen: Vitamin A palmitat (250 IU/g), flytande paraffin, vitt vaselin.

Vad är Bevita Eye A? Bevita Eye A är en ögonsalva med vitamin A, som inte innehåller något konserveringsmedel.

Beskrivning av preparatet: Bevita Eye A tillhandahålls i tuber med 5 g ögonsalva.

För vilka besvär lämpar sig Bevita Eye A?

Ögonsalva ger långvarig lindring för torra ögon som beror på ögonirritation samt vid en brännande känsla eller röda ögon som beror på yttre faktorer (vind, sol, torr inomhusluft, saltvatten, rök, kraftigt ljus), långvarig ansträngning av ögonen (studier, läsande, datoranvändning, bilkörning i mörker) eller bruk av kontaktlinser. De smörjande och återfuktande egenskaperna hos vitamin A hjälper till att återställa tårflimrens naturliga fysiologiska egenskaper och ger dessutom ett skydd för ögats yta.

Hur ska Bevita Eye användas?

Tvätta händerna och skruva av hatten på tuben. Böj huvudet bakåt och dra försiktigt ned det nedre ögonlocket med pekfingeret så att det bildas en liten ficka mellan ögonlocket och ögats yta. Kläm långsamt på tuben tills ca 1 cm ögonsalva applicerats på det nedre ögonlocket. Blinka 2-3 gånger så att salvan sprids ut jämnt över hela ögats yta. Torka av eventuell överlopps salva som brett ut sig runt ögat med ett rent, mjukt papper. Skruva tillbaka hatten på tuben. P.g.a. sin konsistens kan ögonsalvan orsaka lindrig, tillfällig dimsyn. Därför rekommenderas dosering en gång dagligen; om kvällarna strax före läggdags.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Produkten är avsedd enbart för lokalt, utvärtes bruk i ögonen.
- Använd inte ögonsalvan om du är överkänslig mot något av innehållsämnen.
- Salvans fettig konsistens kan orsaka lindrig, kortvarig dimsyn efter doseringen. Applicera därför inte ögonsalvan strax före aktiviteter som kräver skarp syn, som t.ex. bilkörning eller användande av maskiner.
- Om du använder kontaktlinser, ska du ta ut dem innan du applicerar salvan. Du kan sätta tillbaka linserna igen tidigast 30 minuter efter att du doserat salvan.
- Om du utöver Bevita Eye A också använder något annat ögonpreparat, ska du ha en paus på minst 30 minuter mellan doseringen av preparaten, och dessutom alltid dosera Bevita Eye A till sist.
- En öppnad tub och eventuellt kvarvarande salvan ska kasseras då 90 dagar förflutit efter att tuben öppnades för första gången.
- Undvik att vidröra ögats yta eller ögonfransarna med tubspetsen.
- Ögonsalvan får inte användas efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Använd inte ögonsalvan om tuben är skadad.
- Förvaras vid +15 - +25 °C.

Förpackningens symboler:



Läs bruksanvisningen



Gränsvärden för förvaringstemperaturerna



Steriliserad med aseptisk teknik



Satsnummer



Sista användningsdatum



Tillverkare



Medicinteknisk produkt

Tillverkare:

Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italien

Marknadsförs av:

Orion Pharma, PB 65, 02101 Esbo, Tfn: 010-4261

Denna bipacksedel reviderades senast i: Augusti 2019.
www.itsehoitoapteekki.fi



Kassera på säkert sätt efter användning.

