

## SILMÄPYYHE

Silmäluumien päivittämiseen puhdistamiseen  
20 kertakäyttöpyyhettä

Bevita Eye silmäpyyhkeet ovat pehmeitä kuitukangasliinoja, joiden ainesosat kosteuttavat ja puhdistavat herkkää silmäluomea ja ripsiä. Bevita Eye silmäpyyhkeet on tarkoitettu sekä aikuisten että lasten herkän silmänympärysihon ja luomien päivittämiseen syväpuhdistukseen. Bevita Eye silmäpyyhkeet sopivat erityisen hyvin käytettäväksi silmäluomien reunojen tulehdustilojen yhteydessä. Bevita Eye silmäpyyhkeet ovat rasvattomia ja luovat miellyttävän, raukkaan ja terveen puhtauden tunteen. Pyyhkeet eivät ärsytä silmäluoeta, joten silmiä ei tarvitse huuhdella vedellä käytön jälkeen. Bevita Eye silmäpyyhkeet eivät sisällä parabeneja, alkoholia tai silikonia.

Koostumus: Karrageenigeeli (Ahnfeltiopsis concinna -uute), kaprylyyli-/kapryyli-glukosidi, kokoyliisoijapolypeptidi, natriumkloridi, kasvipiperäinen glyseriini, natriumbentsoaatti, kaliumsorbaatti, vedetön natriumdehydroaetaatti, puhdistettu vesi.

### Käyttöohjeet:


Silmien alueen päivittämiseen puhdistamiseen: Avaa pussi puhtain käsin ja ota kertakäyttöpyyhe suojaussistaan. Avaa pyyhe kokonaan ja pyyhi sillä hellävaroen yläluomen luomireunan ja ripsien yli pitäen silmäsi suljettuna. Asetu peilin eteen, ja avaa silmän alaluomea vetämällä silmäripsiä varovasti alaspäin. Pyyhi silmän alaluomen reunaan varovasti. Älä kosketa pyyhkeellä silmää.



Jos silmien alueella on vaikeasti irrotettavia eritteitä, silmäluomen reuna on tulehtunut (sidekalvontulehdus, blefarokonjunktiviitti, näärännäppy) tai kyynelkanava tukkeutunut, suositellaan lämpimien, kosteiden kääreiden käyttöä. Näissä tapauksissa voit lämmittää edelleen suljetussa suojaussissaan olevan kertakäyttöpyyhkeen lämpimässä (40°C) vedessä 3–5 minuutin ajan. Avaa tämän jälkeen suojaussi, ota pyyhe pussistaan ja hiero hellävaroen hoidettavaa aluetta edelleen kokoon taitetulla pyyhkeellä noin 1–2 minuutin ajan pitäen silmäsi suljettuna.



Jos silmäluomet kutiaavat tai ovat turvonneet, kertakäyttöpyyhkeet toimivat lievittävinä kylminä kääreinä: Laita suljetussa suojaussissaan oleva kertakäyttöpyyhe jääkaappiin ainakin tunniksi. Avaa pussi, ja aseta edelleen kokoon taitettu pyyhe silmäluomelle 1–2 minuutin ajaksi pitäen silmäsi suljettuna.

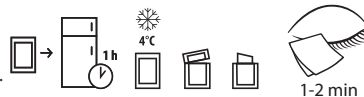

### ÄLÄ HUUHTELE SILMÄÄ KÄYTÖN JÄLKEEN. VAIN ULKOISEEN KÄYTTÖÖN.

#### Varoitukset/varoitoimet:

- Älä käytä silmäpyyhettä, jos olet yliherkkä jollekin sen sisältämälle aineelle.
- Älä käytä silmäpyyhettä, jos sen suojaussi on vaurioitunut.
- Lämpimät ja kylmät kääreet: Noudata edellä annettuja ohjeita.
- Kun kertakäyttöpyyhe on lämmitetty, on se käytettävä muutaman minuutin kuluessa tai hävitettävä käyttämättömänä.
- Säilytettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
- Säilytettävä alle 25°C:ssa.
- Valmistetta ei saa käyttää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Älä käytä samaa pyyhettä molempiin silmiin.
- Ei saa jäätyä.

#### Pakkauksen symbolit:



## ÖGONSERVETT

För daglig rengöring av ögonlocken  
20 engångsservetter

Bevita Eye ögonservetter är mjuka engångsservetter i fibertyg, vars ingredienser såväl fuktar som rengör det känsliga ögonlocket och ögonfransarna. Bevita Eye ögonservetter är avsedda för noggrann daglig rengöring av ögonlocken och den känsliga huden runt ögonen hos både vuxna och barn. Bevita Eye ögonservetter lämpar sig särskilt väl vid behandling av inflammationer i ögonlockskanten. Bevita Eye ögonservetter är fettfria och lämnar en skön, fräsch och frisk känsla. Servetterna irriterar inte ögonområdet. Ögonen behöver inte sköljas med vatten efteråt. Innehåller ej parabener, alkohol eller silikon.

Sammansättning: Karragengel (Ahnfeltiopsis concinna extrakt), kaprylyl/kaprylglykosid, kokoylsjopolypeptid, natriumklorid, vegetabiliskt glycerin, natriumbensoat, kaliumsorbat, vattenfritt natriumdehydroacetat, renat vatten.

### Bruksanvisning:

För daglig rengöring av ögonområdet: Öppna skyddspåsen med rena händer och ta ut engångsservetten. Öppna servetten helt och hållet, och för den lätt och försiktigt över ögonlockskanten och ögonfransarna medan du håller ögat slutet. Ställ dig framför en spegel och öppna nedre ögonlocket genom att försiktigt föra ögonfransarna nedåt. Torka försiktigt på den nedre ögonlockskanten. Undvik att komma i kontakt med själva ögongloben.




Ifall det finns sekret som är svårt att ta bort, inflammationer i ögonlockets kant (bindhinneinflammation, blefarokonjunktivit, vage) och topp i tårkanalen rekommenderas det att använda vätvärma omslag på det drabbade området. För detta ändamål kan du värma en engångsservett, som fortfarande ligger i sin slutna, intakta skyddspåse, i varmt vatten (40 °C) i 3–5 minuter. Då servetten värmts upp, ska påsen öppnas och den fortfarande hopvikta engångsservetten användas för att försiktigt massera området som ska behandlas i 1–2 minuter med ögat slutet.



1-2 min

Vid kliande eller svullna ögonlock ger kalla omslag en sammandragande och lindrande effekt. Kyl engångsservetten (som ligger i sin slutna skyddspåse) i kylskåp i minst en timmes tid. Öppna påsen och lägg den fortfarande hopvikta servetten på ögat i 1–2 minuters tid, medan du håller ögat slutet.

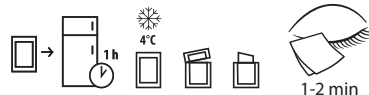

1-2 min

SKÖLJ INTE ÖGONEN EFTER ATT DU ANVÄNT ENGÅNGSSERVETTERNA.

ENDAST FÖR UTVÄRTES BRUK.

### Varningar/försiktighetsåtgärder:

- Använd inte engångsservetterna om du är överkänslig mot något av innehållsämnen.
- Använd inte servetten om skyddspåsen är skadad.
- För varma och kalla omslag, följ instruktionerna i denna bruksanvisning.
- Då engångsservetten värmts upp, ska den användas inom några minuter eller alternativt kastas bort.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid högst 25 °C.
- Får inte användas efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Använd inte samma engångsservett för båda ögonen.
- Får ej frysas.

Förpackningens  
symboler:



Läs bruks-  
anvisningen



Övre gränsen för  
förvaringstempe-  
raturen



Återanvänd  
inte



Satsnummer



Sista  
användningsdatum



Tillverkare



Kassera på sakenligt sätt  
efter användning.